

# DIPHOTERINE®

## ENSIAPU KEMIKAALITAPATURMISSA

Pysyviä vammoja syntyy usein vain sekuntien kuluessa. Hätäsuihkulle meno ja yritys pestä aggressiivisiä kemikaaleja vedellä pois voivat viedä liikaa aikaa. Sen lisäksi vesi pystyy vain rajoitetusti laimentamaan eikä sillä ole neutraloivia ominaisuuksia, mikä tekee jatkuvan huuhtelun pitkäksi aikaa tarpeelliseksi halutun vaikutuksen saavuttamiseen. Tämän ajan kuluessa kemikaalin hyökkäys jatkuu.

Välittömällä neutraloimisella ehdimme pysäyttää kemikaalin ennen kuin se aiheuttaa pysyviä vammoja. Voimme myös kohdella hätätilassa olevaa henkilöä turvallisemmin koska vaatteetkin neutraloidaan, samalla kun se helpottaa pintojen ja materiaalin puhdistusta.



### AINUTLAATUINEN HUUHTELUNESTE

Diphoterine® on ainutlaatuinen huuhteluneste ensiavun käyttöön, joka neutraloi nopeasti ja tehokkaasti happoja ja emäksiä kuten esim. suolahappoa, rikkihappoa ja natriumhydroksidia (lipeä). Diphoterine® vaikuttaa jopa liuotteita, hapetteita ja kelatatteja vastaan ja testattiin toimivaksi 1100 kemikaalia kohtaan.

Diphoterine® koostuu räätälöidystä molekyylistä, joka tehokkaasti imee kemikaalin ja tekee sen vaarattomaksi. Amfoteeristen ja hypertonisten ominaisuuksiensa johdosta sitä voi turvallisesti käyttää kaikkia kemikaaleja vastaan, samalla kun se estää haitallisen kemikaalin läpipääsyn ja auttaa vetämällä ulos läpäistyä kemikaalia kudoksesta.

### TARKOIN SUUNNATTU HOITO

Diphoterine® on saatavilla eri valmistusmuodoilla, joita voi käyttää koko vartalolla, iholla, silmissä, suuontelossa ja korvakäytävässä. CE-merkitty ja EN15154-3/4:n mukaan se on arvostettu lääketieteellisen tekniikan tuote sekä korvike silmä- ja hätäsuihkuun ja sen positiiviset vaikutukset ovat tieteellisesti ja käytännössä todistettu Ruotsin työympäristöviraston raportissa 2010:6.



### PIKAFAKTA

Kemikaalitapaturmien hoitoa varten.

**CE** CE-merkitty lääketieteellisen tekniikan tuote.

EN 15154-3/4:n mukaan hyväksytty korvike silmä- ja hätäsuihkuun.

Tehokas yli 1100 kemikaalia vastaan.

Tehokas happoja ja emäksiä vastaan.

Voi käyttää silmissä, iholla, suuontelossa ja korvakäytävässä.

Kertakäyttöön.

Säilyy 2 vuotta.

”USEIMMAT TAPATURMAT  
EIVÄT TAPAHDU, VAAN  
ANNAMME NE TAPAHTUA...”

# DIPHOTERINE® TUOTELISTA



## DIPHOTERINE® SIEW Tuote nro 99-2-01

Diphoterine® SIEW 50ml on kannettava silmäsuihke, jota käytetään ensiapuna välittömästi 10 sekunnin sisällä neutralisoimaan kemikaaliroiskeet silmässä. Saatavilla myös kuuluvalla nahkasuojuksella klipsin kanssa esim. vyöhön kiinnitystä varten.



## DIPHOTERINE® MINI JA MICRO Tuote nro 99-2-03 / 99-2-02

Diphoterine® Mini (200ml) ja Micro (100ml) ovat suihkepulloja, jotka on tarkoitettu ensiavun hoitoon neutralisoimaan pienempiä kehon osia (esim. kasvoihin tai käsivarsiin). Käytetään 60 sekunnin sisällä kemikaaliroiskeen saatuaan. Saatavilla myös kuuluvalla seinäkiinnikkeellä tai nahkasuojuksella.



## DIPHOTERINE® PULLO Tuote nro 07-2-26

Diphoterine® 500ml Pullo on tarkoitettu ensiavun hoitoon neutralisoimaan kemikaaliroiskeita silmissä. Käytetään 60 sekunnin sisällä kemikaaliroiskeen saatuaan. Saatavilla myös kuuluvalla vyötaskulla (yhdistetyllä vyö- tai olkataskulla).



## DIPHOTERINE® PUSSI Tuote nro 99-2-25

Diphoterine® 500ml Puski sisältää myös letkunpuristimen ja silmäkupin. On tarkoitettu ensiavun hoitoon neutralisoimaan kemikaaliroiskeita silmissä. Käytetään 60 sekunnin sisällä kemikaaliroiskeen saatuaan. Diphoterine® Puski suositellaan sairaanhoitoa varten. Saatavilla myös kuuluvalla taskulla (yhdistetyllä vyö- tai olkataskulla).



## DIPHOTERINE® HUUHTELUASEMA Tuote nro 11-2-27

Seinään kiinnitetty huuhteluasema sisältää 2 pulloa Diphoterine® roiskeiden neutraloimiseen ja silmien huuhteluun sekä 200ml Diphoterine® Mini-suihkepullo pienempien roiskeiden poistoa varten iholta (esim. kasvoista tai käsivarresta).



## DIPHOTERINE® DAP Tuote nro 99-2-75

Diphoterine® DAP 5L on itsestään pystyssä pysyvä, kannettava suihku, joka on tarkoitettu isompien kemikaaliroiskeiden neutraloimiseen ja huuhteluun koko vartalosta. Hoito on aloitettava 60 sekunnin sisällä onnettomuuden sattuessaan.

## LISÄVARUSTEET & VARAOSAT

|  |  |   |  |   |                   |
|--|--|---|--|---|-------------------|
| <b>Diphoterine DAP 5L, vaihto käytön jälkeen</b>                 | Automaattinen kannettava suihku, pelti, säilyy kaksi vuotta, huuhtelusuihku koko vartaloa varten | Tuote nro 99-2-76                           | <b>Nahkasuojus Diphoterine 50ml</b>          | Nahkasuojus Diphoterine 50ml Siewelle, kiinnitetään vyöhön                              | Tuote nro 07-0-01 |
| <b>Diphoterine DAP 5L, vaihto viimeisen käyttöpäivän jälkeen</b> | Automaattinen kannettava suihku, pelti, säilyy kaksi vuotta, huuhtelusuihku koko vartaloa varten | Tuote nro 99-2-77                           | <b>Nahkasuojus Diphoterine 100ml</b>         | Nahkasuojus Diphoterine 100ml Microlle, kiinnitetään vyöhön                             | Tuote nro 01-0-02 |
| <b>Suojakaappi DAP 5L</b>  | Suojakaappi, muovi, sopii Diphoterineen ja Hexafluorineen. Myös lämmityksellä / EXluokiteltu.    | Tuote nro 03-0-60<br>03-0-60V<br>03-0-60VEX | <b>Nahkasuojus Diphoterine 200ml</b>         | Nahkasuojus Diphoterine 200ml Minille, kiinnitetään vyöhön                              | Tuote nro 01-0-03 |
| <b>Vyötasku 500ml:n Diphoterineen</b>                            | Vyö-/olkatasku kankaasta Diphoterinen 500ml:n pussiin tai 500ml:n pulloon                        | Tuote nro 07-0-26                           | <b>Seinäkiinnike 100/200ml Diphoterineen</b> | Seinäkiinnike muovista, oranssi. 1kpl:seen. 100ml:n tai 200ml:n Diphoterine suihkepullo | Tuote nro 10-0-03 |

Uusi DAP sisältää suojakaapin, sakset, käsiineet ja kyllin silmämerkillä. Joka DAP:illa on ominainen numero tunnisteena. DAP:n vaihto sisältää sakset ja käsiineet.



Medical Care System tuottaa ja jakaa korkealaatuista ja helposti saatavia ensiapu-tuotteita kemiallisten ja termisten palovammojen nopeaa ja tehokasta hoitoa silmiin sekä koko vartalolle. Järjestämme myös asiakkaille erityisesti sovellettuja riskianalyyskejä ja koulutuksia kemiallisista ja termisistä vaaroista, sekä miten niitä vältetään. Opetamme myös parhaan hoitotavan onnettomuuden sattuessaan. [www.medicalcare.se](http://www.medicalcare.se)