



Första Hjälpn för brännskador

Passar i Första Hjälpn-stationen



Cederroth Burn Gel Spray



Cederroth Burn Gel Dressing

Produktfördelar

- Kväck avkylning och snabb smärtlindring
- Vattenlöslig
- Icke giftig

Cederroth Burn Gel ger snabb avkylning och effektiv smärtlindring vid brännskador. Kylan gör att smärtan minskar och hindrar att skadan går djupare ner i huden. Cederroth Burn Gel kyler lika effektivt som ljummet vatten och påskyndar därmed läkningsprocessen. Brännskador ska behandlas snabbt, därför är det lämpligt att ha Burn Gel både hemma, på arbetet och med på resan för bästa beredskap. Speciellt på platser där det inte finns rent rinnande vatten.

Cederroth Burn Gel Spray och Dressing används vid ytliga och delvis djupa brännskador, skällningar, solsveda och elektriska brännskador. Spraya på ett tjockt lager gel på brännskadan. Upprepa vid behov. Gnid inte in gelen. Innehållet är sterilt tills flaskan används första gången.

En öppnad flaska ska förbrukas inom 24 timmar. Innehåller vattenbaserad gel (>95% vatten). Hållbarhetstid 5 år.

Cederroth Burn Gel Spray

50 ml/flaska
REF 901901
Spraya på ett tjockt lager gel på brännskadan.

Cederroth Burn Gel Dressing

2 kompresser 10x10cm/ask
REF 901900
Kompressen kan placeras utanpå brända kläder.